



**CONTACT<sup>®</sup>  
SÉCURITÉ**

JUIN 2010

## BRANCARD CUILLERE Réf. SCOOP

### Spécifications et utilisation

Construit en aluminium anodisé, résistant aux corrosions et robuste pour garantir la résistance et la légèreté du brancard. Les tubes sont réalisés avec un diamètre suffisant pour supporter les charges diverses.

Toutes les parties soumises à tension sont rivetées ensemble avec des rivets acier, les autres parties en rivets aluminium.

Les fermetures sont fabriquées en fer forgé zingué et ne peuvent s'ouvrir accidentellement.

**LES SPECIFICATIONS DE NOTRE BRANCARD CUILLERE EST CONFORME A LA NORME EUROPEENNE EN 1865 ET TOUS LES ESSAIS TECHNIQUES ONT ETE EFFECTUES PAR UN ORGANISME CERTIFIE QUI DELIVRE EGALEMENT LES CERTIFICATS "CE".**

### Utilisation


Pour mettre un blessé, ouvrir un ou les deux fermetures qui se trouvent à chaque bout du brancard en poussant sur le bouton A. Ouvrir le brancard et glisser les deux parties de chaque côté sous le patient. Pour la fermeture des deux côtés enclencher les verrous et vérifier la bonne fermeture.

Pour régler la longueur tourner le petit levier B de 90° et tirer les deux tubes aussi loin que nécessaire, enclencher ensuite le levier B dans les trous de retenue.

Le brancard peut être rangé en position plat ou plié en deux. Pour plier le brancard, tirer au maximum les deux tubes et plier ensuite la partie supérieure sur la partie inférieure de la civière.

Pour une utilisation correcte le brancard doit être soulevé par les poignées se trouvant de chaque côté du brancard et non pas par les tubes aux extrémités, ceci peut être dangereux pour le blessé et endommager le brancard.

Pour nettoyer le brancard on peut utiliser de l'eau et du savon et éventuellement un désinfectant approprié. A des intervalles réguliers, il est recommandé de huiler les deux tubes d'extension avec un peu de graisse de vaseline.

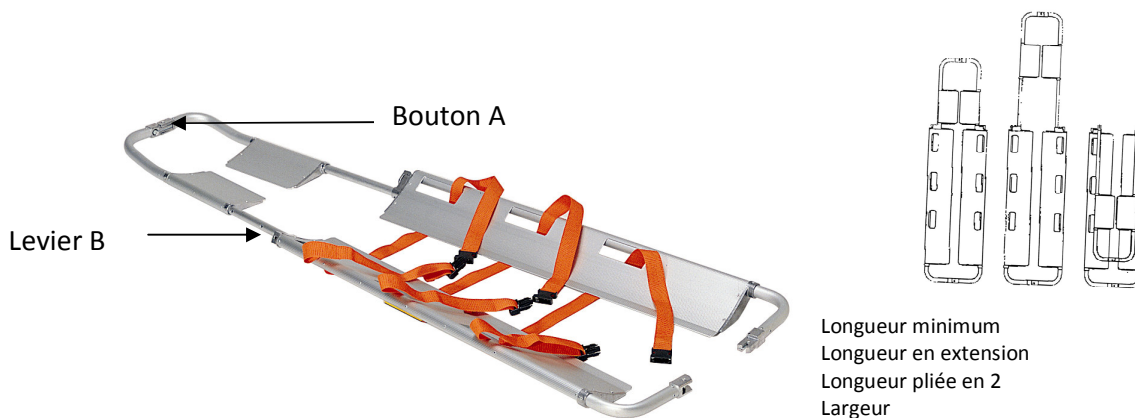

Longueur minimum	1710 mm
Longueur en extension	2050 mm
Longueur pliée en 2	1210 mm
Largeur	430 mm
Poids	9 kg
Charge maximale	150 kg

### LES MOYENS DU SECOURS, LA MAITRISE DE L'URGENCE

11, avenue Marcel Dassault – F 37200 TOURS TECHNOPOLE

Tél. : 33 (0) 247 28 29 30 – Fax. : 33 (0) 247 28 30 40

e-mail : [contactsecurite@contactsecurite.fr](mailto:contactsecurite@contactsecurite.fr) - Internet : <http://www.contactsecurite.fr>

S.A. au CAPITAL DE 80 000 € - R.C. B 328 579 115 – Code APE 3250 A – T.V.A. INTRA : FR 77 328 579 115

