



**CONTACT<sup>®</sup>  
SÉCURITÉ**

JUIN 2010

## PLAN DUR D'ÉVACUATION Réf / PDAE

Système polyvalent d'immobilisation et d'évacuation pour adulte et enfant comprenant un plan dur adulte et un plan dur pédiatrique.

Ce système 2 en 1 permet un stockage de faible encombrement (épaisseur : 5,5 cm).

Rigide. Léger (poids 8 kg). Résistant aux chocs.

Imputrescible.

Totalement radio-transparent et conforme à la Norme NF EN 1865.

14 poignées de portage.

Compatible avec tout type d'immobilisateur de tête.

Charge maximale : 180 kg.

Sangles de maintien en accessoires.

Dimensions :

longueur 183 cm,

largeur 44,5 cm,

épaisseur 5,5 cm.


Poids 8 kg.

Design sans jonctions qui prévient les infiltrations de liquides et évite le risque d'infections croisées

Les dommages de la colonne vertébrale peuvent être diagnostiqués sans retirer le patient du plan dur.

Compatible avec tous les différents immobilisateurs de tête

Cette conception exclusive permet d'avoir deux différents profils avec un seul produit, en réduisant les coûts et les volumes de stockage

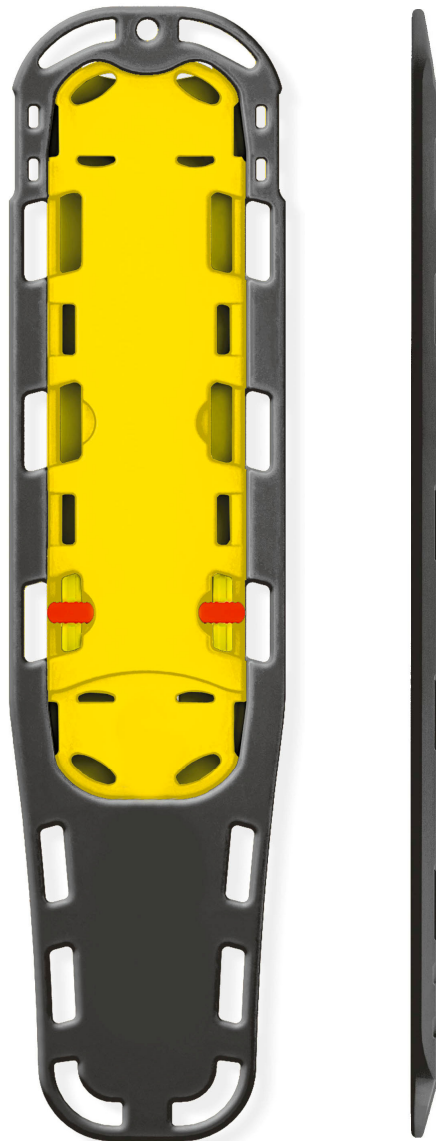

LES MOYENS DU SECOURS, LA MAÎTRISE DE L'URGENCE

11, avenue Marcel Dassault – F 37200 TOURS TECHNOPOLE

Tél. : 33 (0) 247 28 29 30 – Fax. : 33 (0) 247 28 30 40

e-mail : [contactsecurite@contactsecurite.fr](mailto:contactsecurite@contactsecurite.fr) - Internet : <http://www.contactsecurite.fr>

S.A. au CAPITAL DE 80 000 € - R.C. B 328 579 115 – Code APE 331 B – T.V.A. INTRA : FR 77 328 579 115





**CONTACT<sup>®</sup>  
SÉCURITÉ**

JUIN 2010

## Plan dur d'évacuation et d'immobilisation pédiatrique Réf / PDIP

Le plan dur vertébral pédiatrique permet de compenser la grande proéminence occipitale de l'enfant grâce à 4 différentes découpes réalisées aux extrémités de la planche.

Les découpes sont, dans leur longueur, de tailles différentes sur les faces supérieures et inférieures de la planche, permettant de choisir le côté le plus adapté à la proéminence occipitale de l'enfant selon sa hauteur.

Cette caractéristique permet donc un meilleur maintien de l'enfant par la surélévation du thorax à partir du bord des omoplates.

Totalement radio-transparent et conforme à la Norme NF EN 1865.

Le plan dur est équipé de 6 poignées de portage.

Charge maximale : 30 kg.

Sangles de maintien en accessoires.

Dimensions :  
longueur 120 cm,  
largeur 32 cm,  
épaisseur 4,5 cm.


Poids 4 kg.

L'enfant c'est un autre monde, il ne doit pas être  
Confondu avec le concept de "petit homme".

C'est la raison pour laquelle naît un support  
technologique étudié exclusivement pour les  
petits patients.

Pour équilibrer la grande proéminence  
occipitale du patient pédiatrique, le thorax  
doit être soulevé avec une épaisseur  
appropriée, à partir du bord des  
omoplates jusqu'à la base de l'épine dorsale.  
Baby Go c'est un support professionnel qui  
optimise le positionnement de l'enfant et permet  
de maintenir l'épine dorsale en position neutre  
et avoir un alignement optimal des voies respiratoires.

C'est pour cette raison que nous avons conçu un plan  
Dur avec quatre profils différents, pour assurer un juste  
Alignement de l'enfant selon sa taille.

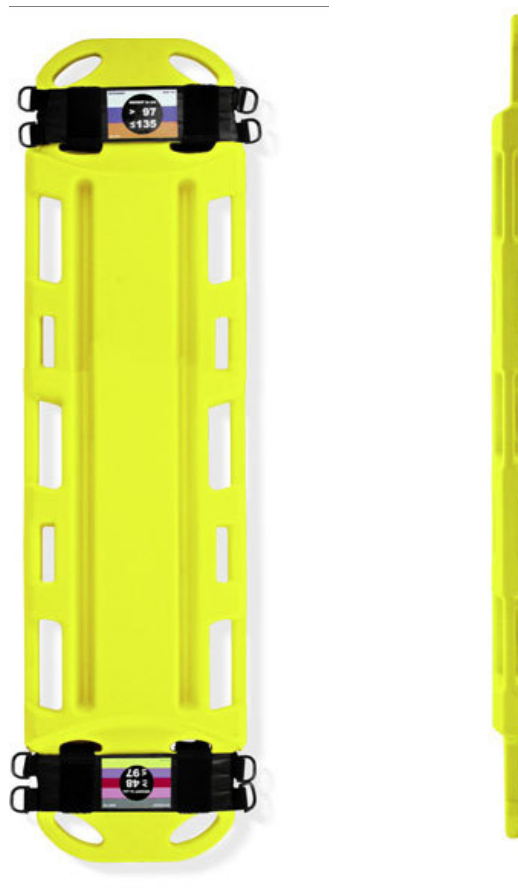

LES MOYENS DU SECOURS, LA MAITRISE DE L'URGENCE

11, avenue Marcel Dassault – F 37200 TOURS TECHNOPOLE

Tél. : 33 (0) 247 28 29 30 – Fax. : 33 (0) 247 28 30 40

e-mail : [contactsecurite@contactsecurite.fr](mailto:contactsecurite@contactsecurite.fr) - Internet : <http://www.contactsecurite.fr>

S.A. au CAPITAL DE 80 000 € - R.C. B 328 579 115 – Code APE 331 B – T.V.A. INTRA : FR 77 328 579 115





**CONTACT<sup>®</sup>  
SÉCURITÉ**

## MODE D'EMPLOI

- 1) Immobiliser cou du patient à l'aide d'un collier cervical  
Placer le portoir parallèlement au patient.
- 2) Position le patient latéralement tout en lui maintenant le cou, le dos, les hanches et les jambes dans un parfait alignement. Puis incliner le portoir jusqu'à ce qu'il soit en contact avec le patient.
- 3) Un fois positionné mettre l'ensemble Patient/Portoir à l'horizontal
- 4) Centrer le patient sur le portoir en le manipulant à trois personnes minimum.
- 5) Boucler en premier les ceintures du tronc inférieur. Serrer les deux ceintures de la même façon, de telle manière que l'extracteur soit maintenu en place en toute sécurité. Boucler la boucle supérieure sans serrer.
- 6) Si nécessaire utiliser un coussinet pour le cou afin de remplir le vide entre le cou et l'extracteur qui permettra un support  
Placer une ceinture au-dessous de chaque jambe.  
Tirer l'extrémité entre les jambes et accoupler les au receveur qui se trouve de l'autre côté de l'extracteur.
- 7) Serrer les deux ceintures de jambe. En cas de soupçon de blessure à l'aîne, passer le restraint autour de la jambe et accoupler le sur le même côté (Nota : l'utilisation des ceintures de jambe n'est pas recommandée en cas d'un soupçon de fracture du fémur ou du pelvien).
- 8) Positionner les panneaux de tête autour de la tête du patient. Eviter tout mouvement du cou. Attacher la ceinture du front. La ceinture pour le menton peut être aussi utilisée autour du collier cervical comme aide pour le support du cou. Emboîter toutes les ceintures, le patient est maintenant prêt pour être enlevé
- 9) Positionner le patient pour l'enlèvement. Procéder comme conseillé par les autorités locales de secourismes. La présence d'au moins 2 secouristes est conseillée lors du transfert. Tourner le patient jusqu'à ce que le secouriste puisse le soulever des hanches. L'autre bras est passé sous la jambe du patient au niveau du genou.  
Une fois le patient placé sur le dispositif de transport, desserrer la ceinture du menton et la ceinture en haut de la poitrine si nécessaire.

### CONTROLE ET ENTRETIEN

Le dispositif doit être contrôlé au moins une fois par mois. Si un dommage est constaté, mettre le dispositif hors services et appeler CONTACT SECURITE S.A.. Le dispositif doit être nettoyé avec un détergent doux ou avec de l'eau savonneuse. Si le dispositif est mouillé, faites le sécher complètement à plat.

### GARANTIE LIMITEE

Ce produit est garanti par CONTACT SECURITE S.A. d'être sans défaut pour une période de 1 an sous réserve d'une utilisation normale.

LES MOYENS DU SECOURS, LA MAITRISE DE L'URGENCE

11, avenue Marcel Dassault – F 37200 TOURS TECHNOPOLE

Tél. : 33 (0) 247 28 29 30 – Fax. : 33 (0) 247 28 30 40

e-mail : [contactsecurite@contactsecurite.fr](mailto:contactsecurite@contactsecurite.fr) - Internet : <http://www.contactsecurite.fr>

S.A. au CAPITAL DE 80 000 € - R.C. B 328 579 115 – Code APE 331 B – T.V.A. INTRA : FR 77 328 579 115

