



CONTACT  
SÉCURITÉ

## COMPRESSES IMPREGNEES POUR BRULURES Réf. GELD

# Calmogel®

- Ralentit et stoppe la progression de la chaleur
- Rafraîchit la brûlure
  - Soulage la douleur
  - Favorise l'hydratation du tissu cutané
  - Application simple et rapide
  - N'adhère pas à la peau
  - Anti-microbien et stérile

### COMPOSITION

- Support en mousse de polyuréthane imprégné d'eau gélifiée à 96% et d'extrait de plantain standard à 4 %.
- Dispositif Stérile ( Péréemption 5 ans)



### MODE D'EMPLOI

- Appliquer la compresse sur la brûlure sans exercer de pression
- La compresse doit être recouverte avec un matériau non absorbant
- La compresse doit être appliquée sur la brûlure pendant 30 à 45 minutes

### GAMME



- Compresse 10 x 10 cm. Réf. GELD 10
- Compresse 20 x 20 cm. Réf. GELD 20
- Compresse 60 x 40 cm. Réf. GELD 60
- Compresse faciale 60 x 40 cm. Réf. GELD F
- Couverture 160 x 120 cm. Réf. GELD 160
- Spray 40 ml. Réf. GELD S



### LES MOYENS DU SECOURS, LA MAITRISE DE L'URGENCE

11, avenue Marcel Dassault – F 37200 TOURS TECHNOPOLE

Tél. : 33 (0) 247 28 29 30 – Fax. : 33 (0) 247 28 30 40

e-mail : [contactsecurite@contactsecurite.fr](mailto:contactsecurite@contactsecurite.fr) - Internet : <http://www.contactsecurite.fr>

S.A. au CAPITAL DE 80 000 € - R.C. B 328 579 115 – Code APE 331 B – T.V.A. INTRA : FR 77 328 579 115



N°12250