




**CONTACT
SÉCURITÉ**

ENTRAVES POIGNETS OU CHEVILLES MAGNETIQUES Réf. EMPC

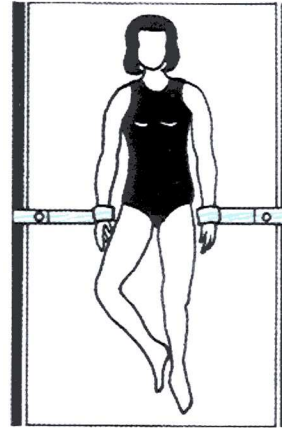

Ce système de contention permet d'assurer un maintien optimal du patient, tout en offrant une grande souplesse d'utilisation. Le personnel soignant peut adapter le degré d'immobilisation en fonction du niveau d'agitation du patient.

Facile et rapide à poser, le système s'adapte à tous les besoins et trouvera sa place dans les services d'urgences, en ambulance, unités psychiatriques, soins intensifs, gériatrie,...

Entraves poignets ou chevilles

Cette attache s'utilise indépendamment de l'entrave pelvienne et se fixe directement sur les hampes d'un chariot-brancard ou d'un lit
Convient lorsque l'on souhaite maintenir un patient les poignets et / ou les chevilles.

Mise en place

Simple et rapide grâce au système de fermeture magnétique de sécurité

- 1/ Enrouler l'attache autour du poignet (ou cheville) du patient, capitonnage molletonné côté peau.
- 2/ Serrer énergiquement, passer l'axe de la fermeture de sécurité dans un œillet en veillant à maintenir le serrage.
- 3/ Passer la sangle dans la boucle métallique.
- 4/ Faire revenir la sangle vers l'axe de la fermeture en continuant de serrer énergiquement.
- 5/ Repasser l'axe dans l'œillet correspondant au serrage souhaité.
- 6/ Passer l'extrémité de la sangle sous la hampe du chariot ou du lit, revenir vers l'axe de la fermeture de sécurité et verrouiller

Composition

2 sangles
4 fermetures de sécurité réf. FEMPC
1 clé magnétique réf. ZI153

Entretien

Retirer les fermetures magnétiques avant lavage.
Ne pas immerger les têtes de fermeture
Lavage à 95°C
Ne pas utiliser de détergent agressif ni de javel
Séchage en tambour maximale 135°C

Les +

LA SÉCURITÉ :

Verrouillage magnétique, 3 niveaux de sécurité possibles

- LE CONFORT :

Sangle 100% coton au contact de la peau du patient

- LA SIMPLICITÉ :

Mise en place aisée et rapide grâce aux codes couleurs très visuels

- LA FLEXIBILITÉ :

Un système modulable qui permet de laisser plus ou moins de liberté au patient.

- L'HYGIÈNE :

Nettoyage à 95°C

LES MOYENS DU SECOURS, LA MAITRISE DE L'URGENCE

11, avenue Marcel Dassault – F 37200 TOURS TECHNOPOLE

Tél. : 33 (0) 247 28 29 30 – Fax. : 33 (0) 247 28 30 40

Email : contactsecurite@contactsecurite.fr - Internet : www.contactsecurite.fr

S.A. au CAPITAL DE 110 080 € - R.C. B 328 579 115 - Code APE 3250 A - T.V.A. INTRA : FR 77 328 579 115

