

**CEINTURE PELVIENNE
SAM SLING II
réf. CPSS**



Dispositif très efficace pour stabiliser les bassins traumatiques et réduire les risques d'hémorragie post-fracture.

Utilisation simple et rapide.

La ceinture SAM SLING II est dotée d'une boucle «auto-stop» qui se bloque lorsque la traction nécessaire autour du bassin est atteinte ceci en fonction de la morphologie du patient (traction de 13, 15 et 18 kg)

La ceinture s'adapte aux différentes morphologies grâce à un réglage de la ceinture par Velcro™ mobile.

Dispositif monobloc et radiotransparent (Rx et RMN)

Installation facile et rapide en 3 gestes

3 Taille disponibles :

- Small : Convient pour un Tour de taille standard 69 – 119 cm
- Medium : Convient pour un Tour de taille standard 81 – 127 cm
- Large : Convient pour un Tour de taille standard 91 – 152 cm

LES MOYENS DU SECOURS, LA MAITRISE DE L'URGENCE

11, avenue Marcel Dassault – F 37200 TOURS TECHNOPOLE

Tél. : 33 (0) 247 28 29 30 – Fax. : 33 (0) 247 28 30 40

Email : contactsecurite@contactsecurite.fr - Internet : www.contactsecurite.fr

S.A. au CAPITAL DE 110 080 € - R.C. B 328 579 115 – Code APE 3250 A – T.V.A. INTRA : FR 77 328 579 115





CONTACT[®]
SÉCURITÉ

Mode d'emploi



Dérouler la ceinture Sling en tournant la face blanche vers soi



Placer la ceinture Sling sur le patient au niveau des fesses (du grand trochanter et de la symphyse pubienne), face blanche à l'intérieur.



Attacher fermement la ceinture Sling en plaçant la face noire en Velcro du rabat sur la face bleue de la ceinture. Ajuster le rabat comme il convient. Centrer la boucle autant que possible



Attraper la sangle orange à l'extérieur du rabat et la tirer vers l'avant, pour l'écarter de la ceinture.



En se faisant éventuellement aider, serrer la ceinture Sling en tirant sur les deux sangles oranges en direction opposée l'une à l'autre.



Continuer de tirer sur la sangle libre jusqu'à ce qu'elle se bloque ou jusqu'à entendre ou sentir la boucle s'enclencher.



Une fois la sangle bien tendue, maintenir la tension et presser fermement la sangle orange contre la surface bleue de la ceinture Sling; laisser ensuite la ceinture se relâcher doucement.



Pour retirer la ceinture Sling, écarter la sangle orange du rabat et détacher le Velcro en le tirant vers l'avant. Maintenir la tension et laisser la ceinture se relâcher doucement.



SINGLE USE ONLY

La ceinture Sling a fait l'objet de recherches et de tests cliniques quant à son efficacité sur un éventail de patients de 60 kg à 104 kg. Son utilisation est déconseillée pour les enfants.

LES MOYENS DU SECOURS, LA MAITRISE DE L'URGENCE

11, avenue Marcel Dassault – F 37200 TOURS TECHNOPOLE

Tél. : 33 (0) 247 28 29 30 – Fax. : 33 (0) 247 28 30 40

Email : contactsecurite@contactsecurite.fr - Internet : www.contactsecurite.fr

S.A. au CAPITAL DE 110 080 € - R.C. B 328 579 115 - Code APE 3250 A - T.V.A. INTRA : FR 77 328 579 115

