

**CONTACT<sup>®</sup>  
SÉCURITÉ**

## PINCE DE MAGIL ADULTE ET ENFANT

Réf. : PMA & PME



<i>Description générale</i>	Instruments de service générale pour les petits soins, voir revendication médicale sur la liste des instruments de l'annexe 1.	
<i>Pièces jointes</i>	Oui	Liste des instruments de service (annexe 1)
<i>Référence lot</i>	Oui	Marquage sur instrument, code F
<i>Dispositif raccordé</i>	Non	
<i>Dispositif Usage Unique</i>	Non	
<i>Dispositif stérile</i>	Non	
<i>Stérilisation</i>	Oui	Autoclavable et toutes types de stérilisation
<i>Autoclavable</i>	Oui	134°C pendant 18 minutes
<i>Nettoyage</i>	Oui	En machine ou à la main avec un produit nettoyant, n'attaquant pas l'acier inoxydable. Voir fiche de conseils pour la stérilisation et le nettoyage annexe 2
<i>Substance impropre</i>	Produit attaquant l'acier inoxydable	
<i>Pièces constitutives</i>	Non	
<i>Matières</i>	Acier inoxydable mat ou brillant AISI 304	
<i>Rohrs</i>	Non	
<i>Standard fabrication</i>	S.O.	
<i>Etiquetage</i>	Oui	marquage CE.Adresse.
<i>Conditionnement</i>	Oui	Par sachet individuel
<i>Stockage particulier</i>	Oui	Dans un endroit propre entre - 40°C et + 95°C
<i>Durée d'utilisation</i>	Courte	
<i>Marquage sur le DM</i>	Oui	marquage CE, Référence lot (F)
<i>Références</i>	Voir liste annexe 1	
<i>Désignation</i>	Instruments de service et accessoires	
<i>Dimensions Lo x la x H(mm)</i>	Voir catalogue	
<i>Poids net (g)</i>	NS	
<i>Résistance température (C°)</i>	Max = + 95°C Min = - 40°C	
<i>Capacité (ml)</i>	NS	
<i>Couleurs</i>	Acier mat ou brillant	
<i>Elasticité (%)</i>	NS	
<i>Utilisation</i>	Instruments chirurgicaux de service non opératoire pour les soins non invasifs (règle 6§2). Permet de couper, tenir, gratter.	
<i>Mode d'emploi</i>	Prendre l'instrument adéquat pour le but recherché, voir liste annexe 1	
<i>Précaution d'emploi</i>	Tenir les instruments propres et les désinfecter après chaque utilisation. A manipuler par des personnes compétentes et formées. Risque de contamination croisée dans le cas d'un emploi multiple non stérilisé. Voir instruction annexe 2	
<i>Recyclage/Récupération</i>	Oui/ Dans les bacs de déchets médicaux en métal	
<i>DEEE/REACH</i>	Non / NC	
<i>PVC/ PHTALATES</i>	Non/ NC	
<i>Données de sécurité</i>	Phrases R = Nul    Combinaison de phrases = Nul	

LES MOYENS DU SECOURS, LA MAITRISE DE L'URGENCE


11, avenue Marcel Dassault – F 37200 TOURS TECHNOPOLE

Tél. : 33 (0) 247 28 29 30 – Fax. : 33 (0) 247 28 30 40

Email : [contactsecurite@contactsecurite.fr](mailto:contactsecurite@contactsecurite.fr) - Internet : [www.contactsecurite.fr](http://www.contactsecurite.fr)

S.A. au CAPITAL DE 110 080 € - R.C. B 328 579 115 – Code APE 3250 A – T.V.A. INTRA : FR 77 328 579 115



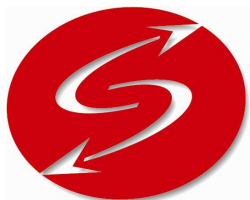

**CONTACT<sup>®</sup>  
SÉCURITÉ**

## CONSEILS DE NETTOYAGE

Contact Sécurité vous propose ses conseils afin de nettoyer de façon optimale les instruments de service.

- Avant la première stérilisation, bien nettoyer les instruments
- Avant le nettoyage, ouvrir les instruments articulés (ciseaux)
- Les instruments à encoches ne doivent être fermés qu'au 1<sup>er</sup> rang
- Les instruments souillés par des matières organiques doivent être trempés très rapidement dans des solutions décontaminantes
- Après contact avec différents produits, essuyer vos instruments
- Afin d'éviter la condensation sur les instruments, laissez les refroidir avant leur sortie du stérilisateur
- Utiliser des produits de nettoyage, de décontamination et de lubrification de pH neutre (7/8) et de l'eau de pH neutre
- Respecter le dosage et le temps conseillé pour les produits de nettoyage, de décontamination et de lubrification
- Éviter l'utilisation de brosses ou éponges abrasives métalliques

Tous nos instruments peuvent être stérilisés en Poupinel ou en Autoclave.

### **Valeurs indicatives de stérilisation :**

POUPINEL (air sec) : AUTOCLAVE (air humide) :

Température : environ 175°C Température : environ 134°C

Préchauffage : 20 minutes Préchauffage : 18 minutes

Stérilisation : 1 heure Stérilisation : 6 minutes

LES MOYENS DU SECOURS, LA MAÎTRISE DE L'URGENCE

11, avenue Marcel Dassault – F 37200 TOURS TECHNOPOLE

Tél. : 33 (0) 247 28 29 30 – Fax. : 33 (0) 247 28 30 40

Email : [contactsecurite@contactsecurite.fr](mailto:contactsecurite@contactsecurite.fr) - Internet : [www.contactsecurite.fr](http://www.contactsecurite.fr)

S.A. au CAPITAL DE 110 080 € - R.C. B 328 579 115 – Code APE 3250 A – T.V.A. INTRA : FR 77 328 579 115

