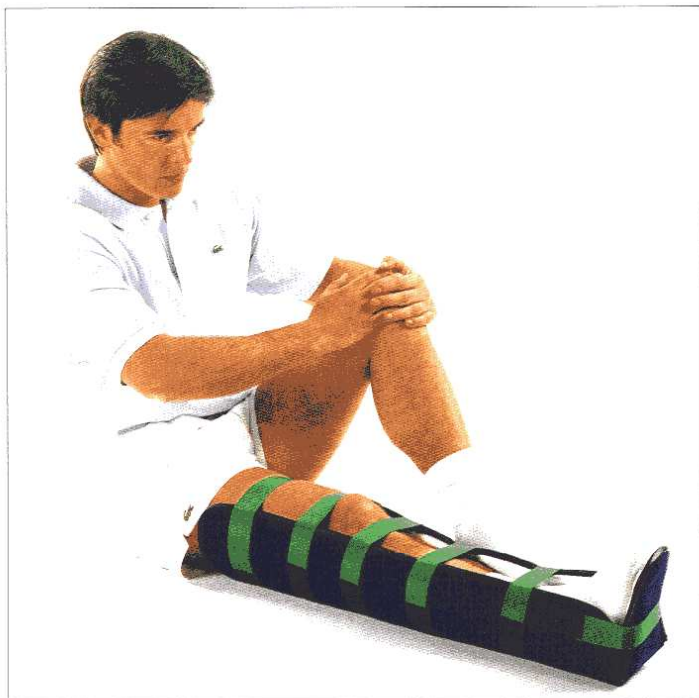


CONTACT  
SÉCURITÉ**ALUFORM®****GOUTTIÈRES MODELABLES**  
MOULD CRADLES - VERFORMBARE SCHIENEN

Réf. 7400  
ALUFORM - Gouttières pour fracture de la cheville, de la jambe ou du genou.  
ALUFORM - Cradle for ankle, leg or knee fracture.  
ALUFORM - Schiene für Knochenbrüche am Knöchel, Bein oder Knie.

**Caractéristiques  
des gouttières ALUFORM**

(Breveté France et étranger)

- Modelable, grâce à une armature en aluminium, ce matériel permet de respecter la déformation du membre fracturé.
- Confortable, grâce au rembourrage assuré par une mousse épaisse.
- Solide, grâce au support réalisé en polyéthylène qui amortit la déformation de l'aluminium et répartit le modelage sur une surface plus grande.
- Facile à mettre en place, grâce au système de fixation par sangles auto-agrippantes.
- Facile d'entretien, grâce à une protection lavable de la mousse.

**ALUFORM cradles characteristics:**

- Adjustable owing to the inserted aluminium parts which respect the limb deformation.
- Comfortable due to the foamed padding.
- Reliable owing to the polyethylene support

- which absorbs the aluminium deformation and gives a larger adjustment.
- The self gripping bands make it easy to use.
- Easily washable.

**Eigenschaften der ALUFORM Schienen:**

- Verformbar: die Schiene ist versteift mittels Leichtmetall-Streifen, die leicht modellierbar, jedoch nicht elastisch sind.
- Bequem: die Polsterung ist sehr wirkungsvoll und bringt dem Verletzten eine spürbare Entlastung.
- Zuverlässig: die Polyäthylen-Polsterung verteilt den Druck auf eine grössere Körperoberfläche, bei nur geringer Verformung der Leichtmetall-Streifen.
- Einfache Anwendung: die Gurten mit Haftverschluss sichern einen raschen Einsatz.
- Pflegeleicht: mit lauwarmem Seifenwasser abwaschbar.



Réf. 7401 - Gouttière pour fracture de la main, du poignet ou de l'avant-bras.  
Cradle for hand, wrist or forearm fracture.  
Schiene für Knochenbrüche der Hand, des Handgelenks oder des Vorderarms



Réf. 7402 - Gouttière pour fracture de l'avant-bras, du coude, du tiers inférieur du bras.

Cradle for forearm, elbow and lower third of the arm fractures.  
Schiene für Brüche des Vorderarmes, des Ellenbogens, des unteren Armdrittels.



Réf. 7404 - Gouttière modèle spécifique enfant pour fracture de jambe.  
Cradle special developped for children.  
Schiene Beinschiene für Kinder.

LES MOYENS DU SECOURS, LA MAITRISE DE L'URGENCE

11, avenue Marcel Dassault - F 37200 TOURS TECHNOPOLE

Tél. : 33 (0) 247 28 29 30 - Fax. : 33 (0) 247 28 30 40

Email : [contactsecurite@contactsecurite.fr](mailto:contactsecurite@contactsecurite.fr) - Internet : [www.contactsecurite.fr](http://www.contactsecurite.fr)

S.A. au CAPITAL DE 110 080 € - R.C. B 328 579 115 - Code APE 3250 A - T.V.A. INTRA : FR 77 328 579 115






**CONTACT  
SÉCURITÉ**


**ALUFORM  
Référence 7400**

Jambe adulte  
Adult's leg  
Erwachsenenbein

Poids: 1000 g  
Weight: 1000 g  
Gewicht: 1000 g

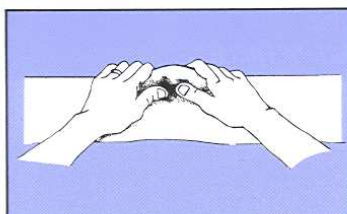

Modelage suivant les déformations  
du membre.  
Adjust according to the limb deformations.  
Anpassen je nach Verformung der Gliedmassen.

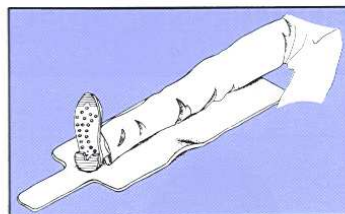


Glissement de la gouttière sous le  
membre.  
Place the Aluform splint under the limb.  
Einführen der Schiene unter das Glied.

**ALUFORM  
Référence 7401**

Avant-bras  
Forearm  
Vorderarm

Poids: 250 g  
Weight: 250 g  
Gewicht: 250 g

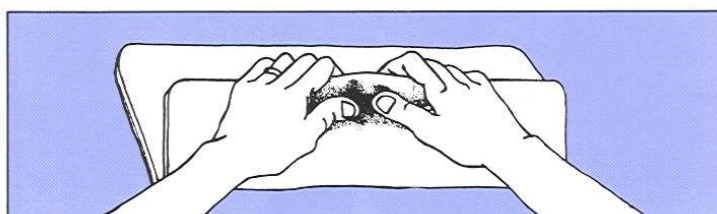


Mise en forme de la gouttière et modelage selon la déformation du membre.  
The splint has to be put in form according to the limb deformation.  
Anpassen der Schiene je nach Verformung der Gliedmassen.

**ALUFORM  
Référence 7402**

Coude  
Elbow  
Ellenbogen

Poids: 400 g  
Weight: 400 g  
Gewicht: 400 g

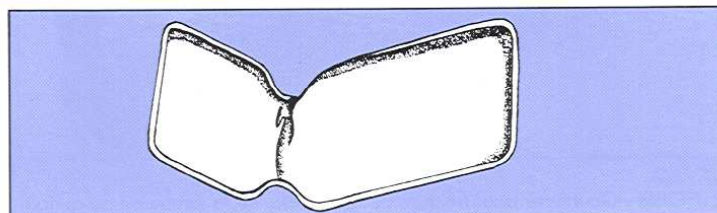


Pliage de la gouttière suivant l'angulation du coude blessé.  
Adjust the splint according to the position of the injured arm.  
Formen des Ellenbogenwinkels.

**ALUFORM  
Référence 7404**

Jambe enfant  
Child's leg  
Kinderbein

Poids: 650 g  
Weight: 650 g  
Gewicht: 650 g

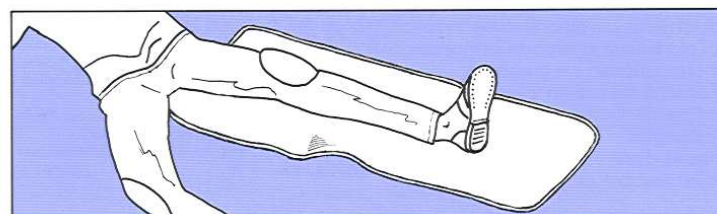

Modelage selon la déformation du membre.  
Modelling according to limb deformation.  
Gestaltung entsprechend der Verformung des Gliedes.


LES MOYENS DU SECOURS, LA MAITRISE DE L'URGENCE  
11, avenue Marcel Dassault – F 37200 TOURS TECHNOPOLE  
Tél. : 33 (0) 247 28 29 30 – Fax. : 33 (0) 247 28 30 40

Email : [contactsecurite@contactsecurite.fr](mailto:contactsecurite@contactsecurite.fr) - Internet : [www.contactsecurite.fr](http://www.contactsecurite.fr)  
S.A. au CAPITAL DE 110 080 € - R.C. B 328 579 115 – Code APE 3250 A – T.V.A. INTRA : FR 77 328 579 115







CONTACT  
SÉCURITÉ

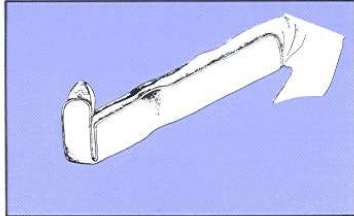


Rabat des volets latéraux et du volet d'extrémité du pied.  
Adjust the both and upper parts.  
Anpassen der Seiten- und Fusspitzenplatten.

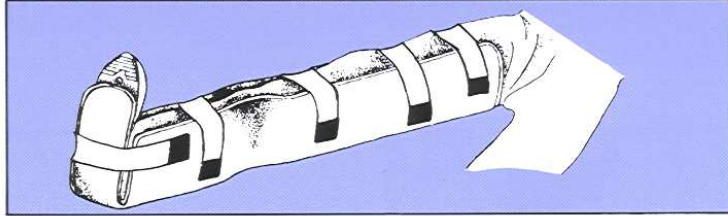


Fixation des sangles. Sangles : 1 x 450 mm + 4 x 350 mm - Jeu de rechange Réf. 7410.  
Have to fix up the self gripping bands. Gripping bands: 1 x 450 mm + 4 x 350 mm - Spare set Réf. 7410.  
Befestigen der Riemen. Riemen 1 x 450 mm + 4 x 350 mm - Ersatzgarnitur Bestellnr. 7410.

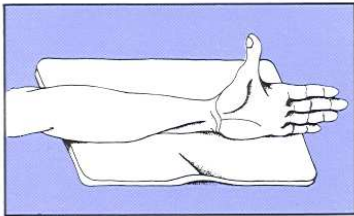


Mise en place de l'avant-bras pouce en l'air.  
Place the forearm thumb up.  
Stellung des Vorderarms (Daumen nach oben).

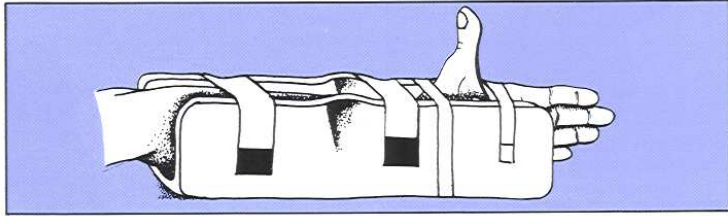


Fixation des sangles. Sangles : 1 x 600 mm + 2 x 280 mm - Jeu de rechange Réf. 7411.  
Adjust the self gripping bands. Gripping bands: 1 x 600 mm + 2 x 280 mm - Spare set Réf. 7411.  
Befestigen der Riemen. Riemen: 1 x 600 mm + 2 x 280 mm - Ersatzgarnitur Bestellnr. 7411.

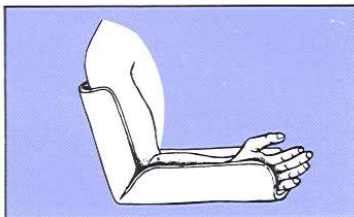


Rabat des volets latéraux de l'avant-bras et du bras. Modelage suivant déformation.  
Adjust the both sides of the splint following the deformation.  
Anpassen der Seitenteile an Oberarm und Vorderarm. Anpassung je nach Verformung.

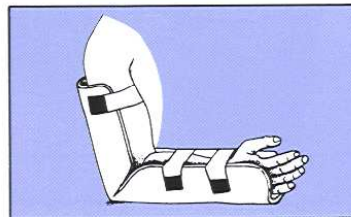


Fixation des sangles courtes sur l'avant-bras et le bras.  
Sangles: 2 x 350 mm + 3 x 280 mm.  
Jeu de rechange Réf. 7412.  
Fix up the shorter self gripping bands on the arm and forearm.  
Gripping bands:  
2 x 350 mm + 3 x 280 mm - Spare set Réf. 7412.  
Befestigen der kurzen Riemen am Oberarm und Vorderarm.  
Riemen: 2 x 350 mm + 3 x 280 mm.  
Ersatzgarnitur Bestellnr. 7412.

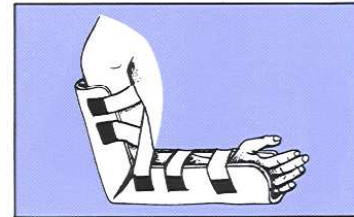

Blocage de l'angle du coude par les deux longues sangles posées croisées.  
Immobilize the elbow joint with the 2 larger bands which have to be crossed up.  
Fixierung des Ellbogenwinkels mit Hilfe der beiden langen Riemen, die kreuzweise angelegt werden.

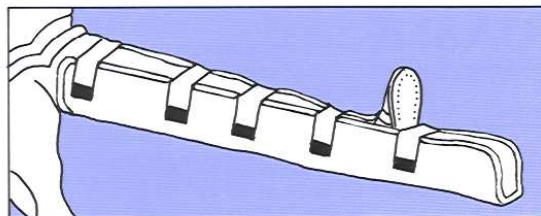

Rabat des volets latéraux.  
Blocage du pied avec une sangle placée à l'extrémité.  
Closing of side flaps.  
Blocking of the foot with a strap fixed at the end of cradle.  
Umschlagen der seitlichen Klappen.  
Blockierung des Fusses mit einem am Ende angebrachten Gurt.

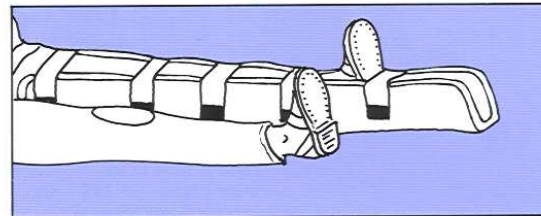

Fixation des sangles sur la gouttière.  
Sangles: 1 x 350 mm + 4 x 280 mm - Jeu de rechange Réf. 7413.  
Fastening of straps on cradle.  
Gripping bands: 1 x 350 mm + 4 x 280 mm - Spare set Réf. 7413.  
Befestigung der Gurte an der Schiene.  
Riemen: 1 x 350 mm + 4 x 280 mm - Ersatzgarnitur Bestellnr. 7413.

LES MOYENS DU SECOURS, LA MAITRISE DE L'URGENCE

11, avenue Marcel Dassault – F 37200 TOURS TECHNOPOLE

Tél. : 33 (0) 247 28 29 30 – Fax. : 33 (0) 247 28 30 40

Email : [contactsecurite@contactsecurite.fr](mailto:contactsecurite@contactsecurite.fr) - Internet : [www.contactsecurite.fr](http://www.contactsecurite.fr)

S.A. au CAPITAL DE 110 080 € - R.C. B 328 579 115 – Code APE 3250 A – T.V.A. INTRA : FR 77 328 579 115

