



**CONTACT
SÉCURITÉ**

JUIN 2016

CANULE DE GUEDEL Réf. CG / CG3




Références

Références	Tailles	ISO	Longueur en mm
ZO 076	000	3	30
ZO 077	00	4	40
ZO 068	0	5	50
ZO 074	1	6	60
ZO 072	2	7	70
ZO 069	3	8	80
ZO 071	4	9	90
ZO 070	5	10	100

La canule de Guédel (ou canule de Mayo) est utilisée pour maintenir ouvertes les voies aériennes d'un patient dans le coma. Elle est souvent utilisée pour le passage de l'air vers les poumons en gardant la cavité buccale et le pharynx libre. En usage de cette canule, le patient ne pourra mordre la sonde endotrachéale et sa langue ne s'affaissera pas vers l'arrière sur l'épiglotte pour obstruer les voies respiratoires.

Elle est choisie en fonction de la distance entre la commissure labiale et le lobe de l'oreille et ne doit pas être fixée afin de laisser la liberté à la victime de la retirer au besoin. Lors de l'usage pour une victime, elle doit être placée en prévision d'un remplacement par une intubation. La canule est souvent réutilisée d'un patient à un autre mais elle sera stérilisée entre deux usages

En Polyéthylène

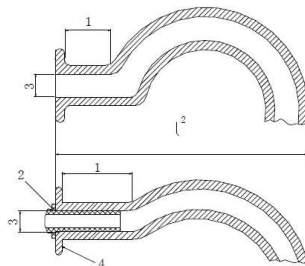

1. Partie Buccale
2. Insert de renfort si fourni,
3. Position pour le mesurage du diamètre interne minimal
4. Extrémité flasque



LES MOYENS DU SECOURS, LA MAITRISE DE L'URGENCE

11, avenue Marcel Dassault – F 37200 TOURS TECHNOPOLE

Tél. : 33 (0) 247 28 29 30 – Fax. : 33 (0) 247 28 30 40

Email : contactsecurite@contactsecurite.fr - Internet : www.contactsecurite.fr

S.A. au CAPITAL DE 110 080 € - R.C. B 328 579 115 - Code APE 3250 A - T.V.A. INTRA : FR 77 328 579 115

