



**CONTACT[®]
SÉCURITÉ**

**GARROT A CLIP
REF. GACLIP**



JUIN 2016

- Classement du dispositif : Classe I
- Durée : Temporaire (règle 1)
- N°. d'enregistrement Afssaps : B.I-24982-98
- Code GMDN : 16632

Règle appliquée (annexe IX/92/43)

- Non - Invasif
- Non chirurgical
- Actif médical (règle 12)

Description générale	Garrot hémostatique à bande élastique lavable plusieurs couleurs et longueur, non stérile. Nom commercial									
Pièces jointes	Oui	Photo, dessin technique, cartonnette								
Référence lot	Oui	Voir sur la boîte								
Dispositif raccordé	Non									
Dispositif Usage Unique	Non									
Dispositif stérile	Non									
Stérilisation	Non									
Autoclavable	Oui	A 121°C pendant 20 minutes								
Nettoyage	Oui	En machine ou à la main avec un produit nettoyant n'attaquant pas l'ABS, 60°C ou 5 à 10 minutes dans l'eau à ¼ de germicide CLOROX, rincer à l'eau claire et sécher, réalisable une dizaine de fois. Ne jamais mettre le garrot en contact avec des graisses ou huiles (Ex : vaseline, huile de paraffine) ou des solvants organiques tel que benzène, éther, ester et hydrocarbure chloré ainsi que des oxydants (chlore, acide péracétique). Produits non exhaustifs.								
Substance impropre	Produit attaquant l'ABS et le polyamide									
Pièces constitutives	Oui	1 boîtier et fermeture en ABS et une bande élastique								
Matières	Boîtier et fermeture en ABS et une bande en polyamide à 65% et caoutchouc à 35%									
Contient du Latex	Non									
Rohrs										
Standard fabrication	S.O.									
Étiquetage	Oui	Cartonnette explicative								
Emballage	Oui	Unitaire sous blister et carton de 100 pièces								
Stockage particulier	Oui	Ne pas stocker au soleil ou à la chaleur > 50°C								
Durée d'utilisation	Courte									
Marquage sur le DM	Oui	CE sur la fermeture et logo+ nom sur le boîtier								
Références	42 900 40	42 900 41	42 900 45	42 900 46	49 900 47	42 900 48	42 900 49	42 900 50	42 900 51	
Désignation	Garrot hémostatiques									
Dimensions Longueur (mm)	480	480	480	480	480	480	400	400	400	
Résistance température (C°)	Max = + 40 Min = -10									
Épaisseur (mm)	1.8									
Poids net (g)	33									
Couleurs	rouge	bleu	noir	pourpre	vert	orange	rose	Bleu ciel	jaune	
Élasticité (%)	150 à 200%									
Tension maximale	50N									
Taux de reversions de flexibilité	90%									
Utilisation	Permet le garrotage des veines sanguines									

Mode d'emploi	Dispositif médical utilisé lors de prise de sang pour comprimer les vaisseaux sanguins d'un membre pour arrêter ou atténuer la circulation sanguine. Les conditions de désinfection et utilisation et de stockage influent sur la durée de vie et les caractéristiques des produits caoutchoutés inclus dans les bandes. Il est de la responsabilité de l'utilisateur de vérifier ces paramètres ainsi que l'intégralité des produits associés avant utilisation. Voir cartonnette pour le descriptif d'utilisation avec schéma à respecter.
Précaution d'emploi	Vérifié avant utilisation que la bande ne présente pas de détériorations ou de coupures. Ne jamais exposer à une température supérieure à 80°C. Respecter le mode d'emploi.
Recyclage/Récupération	Non
DEEE/REACH	Non/Non
PVC/Phtalates	Non/Non
Données de sécurité	Phrases R = Nul Combinaison de phrases = Nul

LES MOYENS DU SECOURS, LA MAITRISE DE L'URGENCE

11, avenue Marcel Dassault – F 37200 TOURS TECHNOPOLE

Tél. : 33 (0) 247 28 29 30 – Fax. : 33 (0) 247 28 30 40

Email : contactsecurite@contactsecurite.fr - Internet : www.contactsecurite.fr

S.A. au CAPITAL DE 110 080 € - R.C. B 328 579 115 – Code APE 3250 A – T.V.A. INTRA : FR 77 328 579 115

